



Juwel-Badelifte

Ein entspannendes Vollbad – Lebensqualität pur!

www.juwel-badelifte.de

Endlich wieder sicher baden
– ganz ohne fremde Hilfe!



TheraMedical
GmbH

Bahnhofstrasse 1a
69151 Neckargemünd
Tel.: 0 62 23 - 86 20 52
Fax: 0 62 23 - 86 20 51
info@theramedical.de
www.theramedical.de
www.juwel-badelifte.de

Made in Germany



Problemlos und sicher kommen Sie in die Badewanne und wieder heraus.

Per Knopfdruck lassen Sie das Band aus dem Gerät und haken es an der Halterung ein. Sie setzen sich auf den Wannenrand und gleiten auf das Badeband, dann drücken Sie einfach auf den Knopf „Pfeil nach unten“ und fahren automatisch sanft ins warme Wasser – bis auf den Wannenboden. Dabei können Sie in jeder Position stoppen.



Sie können nichts falsch machen. Zusätzlich sind zahlreiche Sicherheitsfunktionen in das Gerät integriert. Dabei können Sie in jeder Position stoppen.



Jetzt lehnen Sie sich zurück, entspannen und genießen...

Wenn Sie Ihr Vollbad beenden möchten, drücken Sie einfach auf den Knopf „Pfeil nach oben“. Sie werden automatisch hochgefahren. Nach dem Gebrauch kann man das Band komplett einrollen. Die Badewanne ist jetzt wieder frei.



Ein entspannendes Vollbad –
Lebensqualität pur!

www.juwel-badelifte.de



Ganz einfach bedienen-
und ganz einfach
genießen!



Juwel-Badelifte



Juwel-Badelift

Premium Plus

Mit Display für Betrieb und Akku-Ladezustand, Wassertemperatur-Anzeige und Fernbedienung.
Optional: Mit Notrufschalter



Juwel-Badelift

Premium

Mit LED-Anzeige für Betrieb und Akku-Ladezustand, mit Fernbedienung

Sie bekommen den Juwel-Badelift in verschiedenen Ausführungen. Was so schöne Auswirkungen auf Ihr Leben hat, sollte auch selbst einfach schön sein. Der Juwel-Badelift präsentiert ein edles Design mit dezenter Präsenz.



Sichere Akku-Stromversorgung

Der Akku ist ganz einfach herausnehmbar und erlaubt Ihnen bis zu 20 Wannengänge. Erst dann muss er wieder aufgeladen werden.



Die einfache Fernbedienung

Mit zwei Tasten zum Heben und Senken des Sitzbandes. Damit sind auch erhebliche Beweglichkeitsdefizite kein Grund mehr, auf Badespaß zu verzichten. Die Fernbedienung verfügt über einen Einhängenhaken.



Das bequeme Sitzband

- aus körperfreundlichem Gewebe
 - temperaturbeständig
 - farbecht
 - antibakteriell
 - ohne Schwermetalle
 - ohne Formaldehyd
 - für Allergiker geeignet
- Die Wasser- und Badezusatzaufnahme liegt bei unter 0,05%.



Das Gleittuch

Das Gleittuch wird über das Badeband gestülpt, dieses ist in der Innenseite mit Teflon beschichtet. Dies ermöglicht es Ihnen je nach körperlichem Zustand, dass Sie beim Auf-, bzw. Abwärtsfahren nicht nach rutschen müssen.



Der sichere Notrufschalter

Körperliche Beeinträchtigungen können sich akut verschlimmern, auch in der Badewanne. Für einen solchen Fall kann beim Juwel-Badelift Premium Plus ein Notrufschalter integriert werden. Damit bekommen Sie auf Knopfdruck Hilfe.





Juwel-Badelifte



Aufsatz für die Badewanne „ohne zu bohren“ Das Original

Alternativ zur Befestigung an der Wand ist ein Badewannen-Aufsatz erhältlich, der in kürzester Zeit montiert werden kann. Die beiden L-Teile sind in der Breite stufenlos für Ihren Wannenrand einstellbar. Und dies „ohne zu bohren“.



Nur bei Juwel: Die abnehmbare Rückenlehne

Sei es aus Gründen der körperlichen Beeinträchtigung, sei es einfach, weil Sie es besonders komfortabel haben möchten: Die Juwel-Rückenlehne ist die attraktive Abrundung unseres Programms. Das PVCD-Gewebe weist die gleichen Eigenschaften auf wie das Sitztuch: Körperfreundlich, farbecht, temperatur- und badezusatzbeständig und leicht zu reinigen.

Zubehör verlängerter Bodenhalter



Als Zubehör gibt es den verlängerten Bodenhalter. Dieser ist in verschiedenen Längen erhältlich, damit man sich bei ein-, aushängen des Badebandes nicht so bücken muss.
Standard 18 cm und 45 cm Höhe

Ihre Vorteile – Punkt für Punkt

 **Made in
Germany**
Eigene Produktion

Die Juwel-Badelifte...

- passen in jede Badewannenform
- sind ganz einfach und praktisch per Knopfdruck zu bedienen
- haben ein dezent-formschönes Design
- lassen Sie direkt auf dem Wannenboden sitzen
- sind auch für Mietwohnungen bestens geeignet
- benutzen als Stromquelle einen herausnehmbaren **24-Volt-Hochleistungsakku** dieser kann auch am Badelift geladen werden.
- auf Wunsch mit integriertem Notrufschalter
- alle Funktionsteile aus 100% Edelstahl
- Abmessungen 53 cm Breite / 23 cm Höhe / 10 cm Tiefe
- abnehmbare Rückenlehne auf Wunsch
- wahlweise großes überschaubares Display oder LED-Anzeige für Betrieb und Akku
- auch für Herzschrittmacherpatienten geeignet

Schnelle und saubere Montage –

unkomplizierter Einbau!



Der Juwel-Badelift kann von eigens dafür ausgebildeten Fachleuten montiert werden. Die Montage kann aber auch selbst vorgenommen werden. Das Gerät kann an jeder Art von Wand befestigt werden. Natürlich bekommen Sie dann von unserem Fachpersonal eine ausführliche Einweisung in alle Funktionen des Badelifts.



www.juwel-badelifte.de



In unserem Firmenverbund mit über 100 Jahren Erfahrung in Konstruktion, Werkzeug- und Maschinenbau, werden in Schönau bei Heidelberg mit hochmoderner Technik und computergesteuerter Präzision die einzigartigen Badelifte entwickelt. Unser kompetentes und freundliches Team berät Sie in allen Fragen. Selbstverständlich völlig unverbindlich und kostenlos.

www.juwel-badelifte.de

Unverbindliche Beratung gebührenfrei unter:

 **0800 400 22 44**

Europaweiter Vertrieb



TheraMedical
GmbH

Bahnhofstrasse 1a
69151 Neckargemünd
Tel.: 0 62 23 - 86 20 52
Fax: 0 62 23 - 86 20 51
info@theramedical.de